

Die FFP2 Maske korrekt anziehen und tragen



1. Vor dem Anziehen der Maske immer die Hände waschen oder desinfizieren.
 2. Maske beim Anziehen nur an den Schlaufen anfassen.
 3. Metallbügel oberhalb der Nase in Form drücken.
 4. Darauf achten, dass die Maske Nase, Mund und Kinn abdeckt.
 5. Maske während dem Tragen nicht berühren.
- Die Maske darf während eines Einsatzes, max. 1 Tag getragen werden ⇒ bei Verschmutzung oder Durchfeuchtung die Maske sofort wechseln.
 - Muss die Maske während zwei Einsätzen zwischengelagert werden, kann dies in einem Couvert oder einer speziellen Box erfolgen.
 - Beim Ablegen nur die Schlaufen anfassen und die Maske direkt in den normalen Abfall entsorgen.

Händedesinfektion



- Genügend Desinfektionsmittel in die trockenen Hände geben.
- Die verschiedenen Schritte sorgfältig durchführen, sodass alle Bereiche der Hände optimal desinfiziert sind.
- Während 30 Sekunden gut einreiben ⇒ bis die Hände trocken sind.